



Tecnoline

Medical & Surgical Solutions

ARCHER

SCAN ME



LAVAGGIO A PULSAZIONE VARIABILE

Archer è un dispositivo monouso sterile, destinato al lavaggio e aspirazione delle ferite chirurgiche in particolare nell'ambito della chirurgia ortopedica ed in vulnologia. Il liquido di lavaggio viene erogato attraverso un sistema Venturi collegato al connettore aria medica presente nella sala operatoria, e grazie al sistema pluriuso (riduttore di pressione) l'operatore può regolare il getto di lavaggio da pulsato a continuo.




SPECIFICHE SISTEMA ARCHER

Archer è stato sviluppato per la pulizia della ferita in ambito chirurgico (ortopedico, vulnologico). L'utilizzatore può regolare la pulsazione del dispositivo secondo le proprie esigenze, grazie al regolatore di pulsazione, inoltre, attraverso la cannula di aspirazione permette di aspirare liquidi e piccoli frammenti ossei presenti nella ferita.

Il sistema di lavaggio è collegato al regolatore di pressione che utilizza l'aria filtrata come vettore di trasporto del liquido di lavaggio tramite la Y venturi di cui è dotato. Archer è un dispositivo medico ECO-FRIENDLY, infatti non richiede l'ausilio di batterie, motori o componenti che generano rifiuti clinici.

COMPONENTI SISTEMA ARCHER

1. Cannula di lavaggio venturi
2. Cannula di aspirazione
3. Connessione a sacca di raccolta aspirato
4. Clamp di controllo aria/liquido
5. Filtro aria 4BAR
6. Connessione al liquido di lavaggio

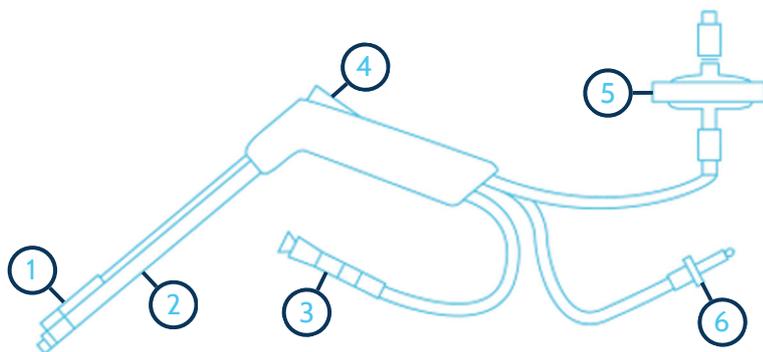

GUIDA ALL' ORDINE

CODICE	DESCRIZIONE	QUANTITA'
TEC950CI	Sistema di lavaggio Archer lunghezza 200mm	20 PZ
TEC951CI	Sistema di lavaggio Archer lunghezza 150mm	20 PZ

Il sistema Archer deve essere utilizzato in combinazione con i seguenti riduttori di pressione distribuiti da TecnoLine S.p.a.

- ▶ Riduttore a regolatore di flusso pluriuso raccordo AFNOR NF 90-106
- ▶ Riduttore a regolatore di flusso pluriuso raccordo UNI 9507
- ▶ Riduttore a regolatore di flusso pluriuso raccordo DIN 13260-2
- ▶ Riduttore a regolatore di flusso pluriuso raccordo NIST ISO 1802



TecnoLine S.p.A.
Registered Office Via Gelatti 11/A - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy
Headquarters Via Gelatti 11/A and 18 - 41033 Concordia sulla Secchia - Modena - Italy
T (+39) 0535 40312 M info@tecnolinemed.com

 **TecnoLine**
Medical & Surgical Solutions

